

DEA

Défibrillateur externe automatisé

1

Allumez le DEA.

2

Appliquez les électrodes.

Retirez tout vêtement ou timbre médical qui pourrait entrer en contact avec les électrodes.

Si la poitrine est mouillée, séchez la peau.

Dans le cas d'un enfant ou d'un bébé, utilisez des électrodes pour enfant ou bébé, ou assurez-vous que les électrodes sont espacées de 2,5 cm (1 po.). Au besoin, posez-en une sur la poitrine et l'autre sur le dos.



3


Suivez les instructions automatisées du DEA.

Si le DEA vous l'indique, pesez sur le bouton pour donner un choc. Assurez-vous que personne n'est en train de toucher la personne pendant le choc.



4

Continuez la RCR, en commençant par les thoraciques compressions.

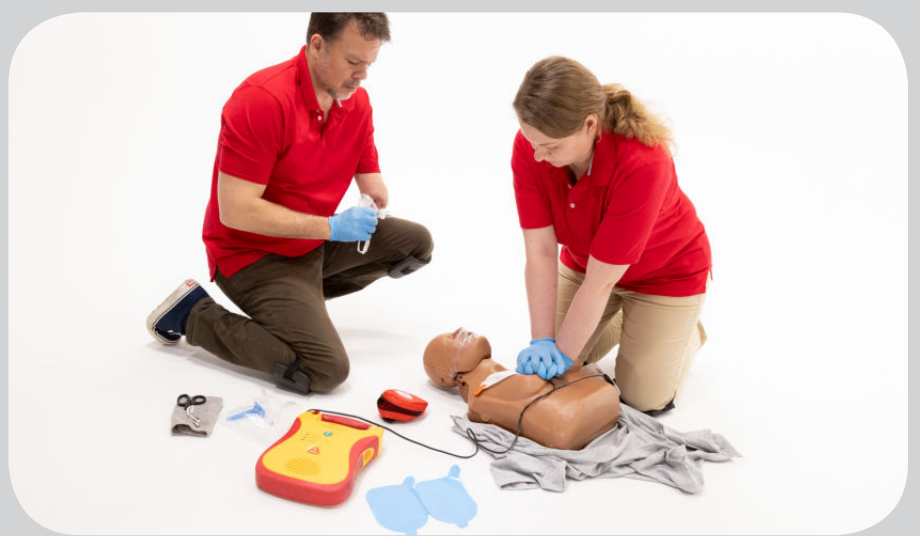

Les informations figurant sur cette affiche ne remplacent pas une formation en secourisme et RCR.

Communiquez avec nous pour trouver un cours de secourisme de la Croix-Rouge offert dans votre région et n'oubliez pas de télécharger gratuitement notre application de secourisme pour appareil mobile.

macr.croixrouge.ca | 1 877 356-3226 | croixrouge.ca/apps

