

RESPIRATEUR
CHIRURGICAL N95

TC-84A-9375

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Une protection respiratoire fiable qui filtre 95 % des aérosols de particules sans huile.
- Matériaux de haute qualité et forme en bec de canard.
- Construction légère et respirante.
- Bande de confort unique en deux parties.
- Barrette nasale réglable.

UTILISATION RECOMMANDÉE


- Efficace contre les aérosols de particules sans huile ; des restrictions sur la durée d'utilisation peuvent s'appliquer.

DÉTAILS DU PRODUIT

Nom du produit:	Medicom SafeMask[®] Architect Pro^{MC}
Type de produit:	À usage unique, non stérile, construction à trois couches
Sangle:	Caoutchouc synthétique sans latex
Barrette nasale:	Fer recouvert de plastique
Couleur:	Blanc
Quantité par carton intérieur:	50
Pays d'origine:	Canada


203214

P

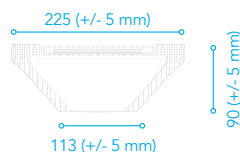


203314

M

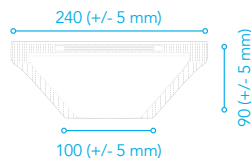

203414

G

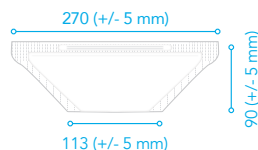

RESPIRATEUR CHIRURGICAL N95


TEST	MÉTHODE	RÉSULTAT
Biocompatibilité : cytotoxicité, sensibilisation de la peau et irritation cutanée	ISO 10993-5 ISO 10993-10	Conforme à la norme
Efficacité du filtre à particules (EFP)	42 CFR 84	≥ 95 %
Résistance à l'écoulement de l'air	42 CFR 84	Inhalation < 35 mm H ₂ O Expiration < 25 mm H ₂ O
Résistance aux fluides (résistance à la pénétration par du sang synthétique)	ASTM F1862	120 mm Hg
Inflammabilité	16 CFR 1610	Classe 1 - conforme
Ajustement	CAN/CSA Z94.4	Une combinaison de toutes les tailles convient à plus de 90 % des utilisateurs

BARRETTE NASALE RÉGLABLE

CONSTRUCTION LÉGÈRE
ET RESPIRANTE

BANDES DE CONFORT
À FENTE UNIQUE

MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ

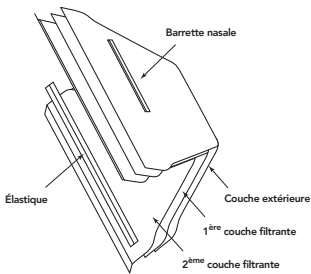

MANIPULATION ET ÉLIMINATION

Après utilisation, le masque peut contenir un liquide à risque biologique.

La manipulation et l'élimination doivent se faire conformément aux pratiques acceptées pour les déchets présentant un risque biologique, dans le respect des lois et réglementations en vigueur.

PRÉCAUTIONS

- N'utiliser que sur une peau propre et saine.
- Ne pas utiliser dans des atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène.
- Ne pas utiliser dans des atmosphères présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé.
- Ne pas dépasser les concentrations maximales d'utilisation établies par les normes réglementaires.
- Le fait de ne pas utiliser et entretenir correctement ce produit peut entraîner des blessures ou la mort.
- Tous les respirateurs approuvés doivent être sélectionnés, ajustés, utilisés et entretenus conformément aux réglementations MSHA, OSHA, CSA et autres réglementations applicables.
- Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. N'utiliser que des pièces de rechange exactes dans la configuration spécifiée par le fabricant.
- Se référer aux instructions de l'utilisateur et/ou aux manuels d'entretien pour obtenir des informations sur l'utilisation et l'entretien de ces appareils respiratoires.
- Instructions spéciales ou critiques pour l'utilisateur
Ce respirateur a été approuvé en tant que masque filtrant chirurgical N95, pour une utilisation dans des établissements de santé conformes aux normes reconnues de biocompatibilité, d'inflammabilité et de résistance aux fluides.

CERTIFICATION & NORMES

Fabricant certifié ISO 13485.
Dispositif médical de classe 1.
Fabricant enregistré auprès de Santé Canada.

Le respirateur chirurgical SafeMask Architect Pro N95 a reçu l'approbation NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) octroyée par les CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies) (numéro d'approbation TC-84A-9375). La certification NIOSH signifie que le respirateur est conforme aux exigences énoncées dans la partie 84, titre 42, Code of Federal Regulations des États-Unis.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, entre 5 °C et 40 °C.
Durée de conservation : 5 ans.



Fièrement fabriqué au Canada.

